

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DESTACADAS



➤ DOS SIMULADORES EN UNO

- Único simulador en el mercado con **doble función para realizar la práctica de adulto y niño.**
- Producto **económico y rentable** por su doble función en un solo simulador.
- **Ligero de peso: 2,2 KG.** Optimiza el espacio para almacenar y facilita el transporte a los formadores.

➤ SELECTOR EXCLUSIVO CON TRES POSICIONES

- El selector permite **convertir el simulador en adulto o niño.**
- Las posiciones adulto y niño incluyen sonido clic para comprobar la correcta profundidad de la **compresión según las directrices de la Guideline2010.**
- La **posición "N"** del selector permite realizar la práctica de RCP sin sonido clic y sin tope profundidad comprobando la correcta formación adquirida.

➤ FUNCIÓN DE RESPIRACIÓN: PERMITE LA PRACTICA REAL

- El sistema de respiración de Practi-Man es **real y único** en el mercado.
- Su **exclusiva válvula conectada al pulmón y nariz**, permite realizar está práctica real.
- Si la nariz no se mantiene cerrada y la cabeza articulada no se inclina correctamente, el pulmón no se llena y no se eleva el pecho.
- La válvula incluye un **sistema de no retorno** que impide a los alumnos inhalar aire de los pulmones evitando posibles contagios durante la formación

➤ ENTRENAMIENTO DEA

- Practi-Man es el **simulador ideal como complemento al DEA** de entrenamiento.
- El tamaño y diseño de Practi-Man es **compatible con todos los desfibriladores** de entrenamiento.
- Los materiales empleados en Practi-Man **permiten utilizar los parches del DEA sin dejar residuos** sobre la piel del simulador.

RECOMENDACIONES DE USO Y LIMPIEZA DEL MUÑECO

El fabricante recomienda el uso individual de los complementos durante la formación. Una correcta limpieza del simulador y el uso de los complementos, asegura una máxima higiene y previene posibles contagios de los alumnos durante la práctica.

El sistema de la válvula ayuda a prevenir posibles contagios durante la formación. Es recomendable cambiar el pulmón después de cada sesión de entrenamiento e higienizar la válvula siguiendo las indicaciones del manual.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL MUÑECO



La protección durante la formación se complementa con el uso de la mascarilla protectora para la práctica del boca a boca.



Es necesario limpiar el simulador desinfectando los labios y la cara separando la piel del rostro de la cabeza después de cada ejercicio realizado por un alumno.



Una vez finalizada la práctica se debe cambiar la válvula y la bolsa pulmonar utilizada. Para ello, retira la cabeza y quita la válvula y la bolsa pulmonar. A continuación sustitúyelas.



Para una desinfección más completa separa el rostro de la cabeza y sumerge cada parte individualmente en un recipiente con un producto desinfectante.

PACK PRACTI-MAN

Cada Practi-MAN contiene: 1 Practi-MAN, 1 Manual de usuario, 5 pulmones y 2 válvulas.

INSTRUCCIONES DE USO




1 Retirar el peto.



2 Unir boquilla con válvula.



3 La bolsa pulmonar debe quedar por debajo de la varilla metálica, nunca por encima.

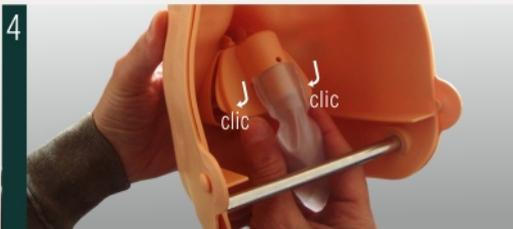

4 Insertar las pestañas de la parte superior de la pieza en la cabeza y presionar hasta oír el clic.



5 Conectar la cabeza al torso encajando la varilla metálica en los enganches situados en ambos lados del cuello.



6 Poner el pulmón en el torso y colocar la pegatina en la marca circular.



7 Volver a colocar el peto y fijarlo a los botones laterales de sujeción.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este producto ha sido sometido a los más rigurosos controles de calidad antes de salir de fábrica. No obstante, de surgir cualquier problema de funcionamiento debido a montaje y/o piezas defectuosas en origen, le rogamos lea las condiciones de garantía y se ponga en contacto con el distribuidor oficial de su zona.

Por este certificado de garantía, ENFAVI, S.L. garantiza que este producto se encuentra libre de defectos materiales y de mano de obra en el momento de su compra por un período de DOS AÑOS desde su entrega.

Si durante el período de validez de la garantía, el producto presentara algún defecto atribuible al proceso de fabricación, debido a materiales y/o mano de obra, el consumidor habrá de informar al distribuidor oficial en el plazo máximo de diez días desde que tuvo conocimiento del defecto, pudiendo optar/decidir el distribuidor oficial entre la sustitución de la pieza dañada o su reparación.

CONDICIONES DE LA GARANTIA:

Datos y documentación: Para tener acceso a la garantía es imprescindible acreditar la adquisición del producto mediante la presentación del ticket o factura de compra y el albarán de entrega, siempre que la entrega del producto sea posterior a la fecha de compra, debiendo facilitar expresamente los siguientes datos: nombre completo y dirección del comprador.

Exclusiones: Esta garantía excluye expresamente los casos siguientes:

- Daños y/o averías sufridas por el producto como consecuencia del mal uso, caídas, dolo o negligencia del usuario, incluyendo la utilización del producto para fines distintos del uso a que está destinado.
- Daños y/o averías producidos por el uso de agentes externos como calor u otros productos nocivos, químicos, obstructivos o corrosivos.
- Daños y/o averías debidos a un mantenimiento inadecuado o a la falta de limpieza.
- Daños y/o averías derivadas del uso de recambios no originales de la marca.

Ámbito geográfico: La garantía es extensiva a todos los países donde este producto sea distribuido por ENFAVI, S.L. o por un distribuidor asignada por ENFAVI, S.L..

Anulación de la garantía: La garantía del producto quedará invalidada:

- En los supuestos de daños causados por las reparaciones llevadas a cabo por personas ajenas al servicio técnico autorizado por ENFAVI, S.L., así como si se reemplazan o se utilizan piezas adicionales o accesorios que no sean originales.
- Por manipulación de los datos de la factura, ticket de compra o albarán de entrega.